

Поврзување на либре 1 со  
xdrip+


# Што ми е потребно?

- Андроид телефон, со андроид верзија 4.4 најмалку, а најдобро да биде верзија 6 или повисока (види во: поставки на телефонот (settings)/ за телефонот (about phone)/ информации за софтверот (software information))

# Што ми е потребно?

- Активен libre сензор  
(Се активира со либре читач или со посебна апликација.
  - Glimp-S. Се симнува од Google Play Store).
  - ВАЖНО - Сензор активиран со Glimp-S потоа не може да се отчитува со читач.

Поставки/Конекции – вклучи NFC

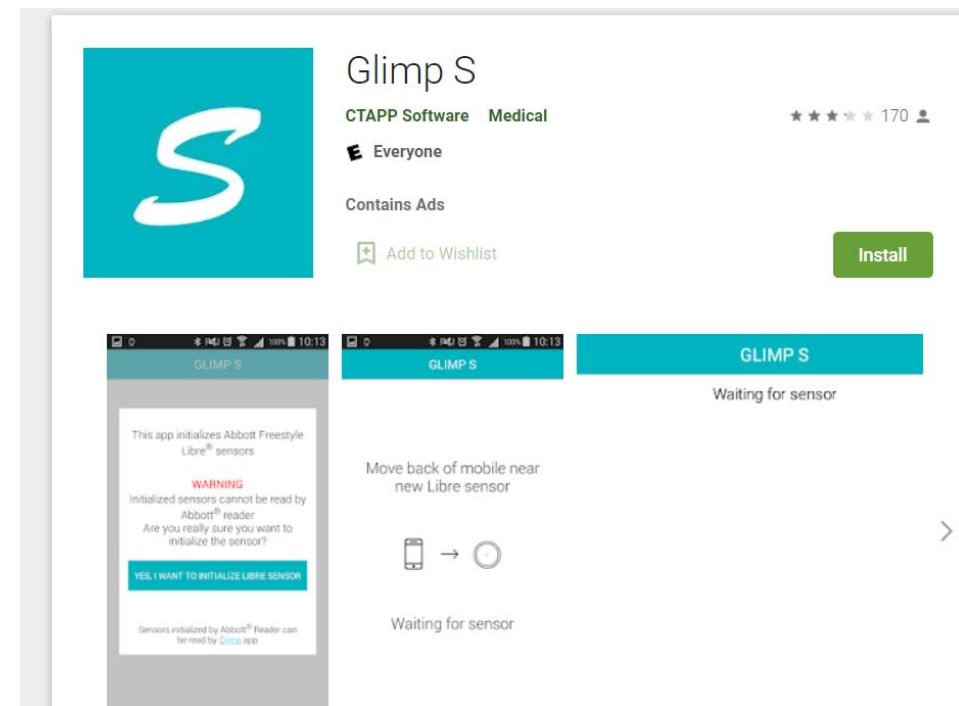



# Што ми е потребно?

- Мост (bubble, blucan, miaomia), со полна батерија (bubble, miaomia доаѓаат со полнач и се полнат од струја – едно полнење 10-14 дена, blucan работи на една батерија CR2032 и трае 7-14 дена)



# Поставување на телефонот


- Во поставки (Settings) / општо управување (General Management)/ датум и време (date and time) – се активира опцијата за автоматски датум и време
- Во поставки (Settings) / локација (location)/ се активира опцијата за локација

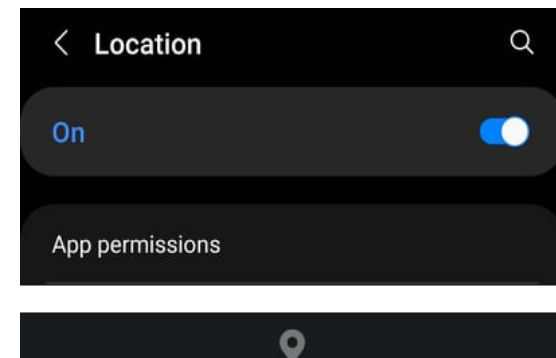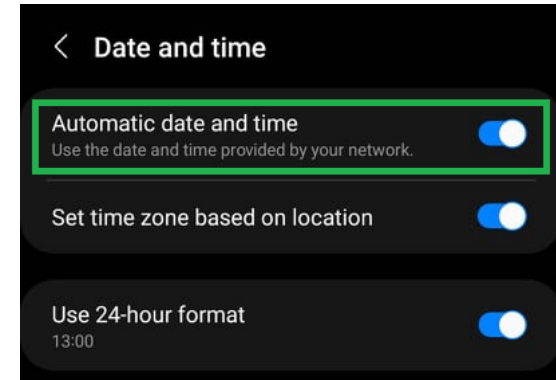

# Поставување на телефонот

- Settings/Device Care/Advanced
- Поставки/Грижа за уредот/Напредно


Да се исклучи автоматското оптимизирање

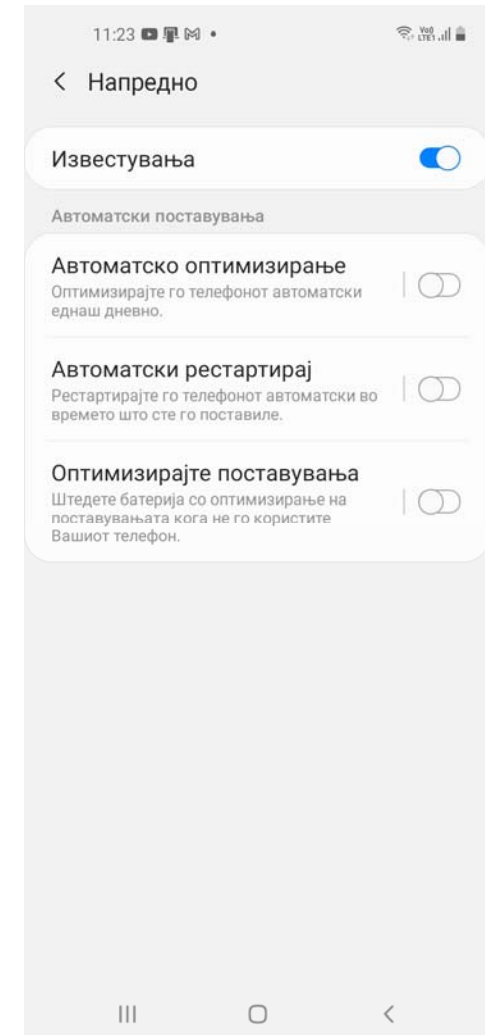

# Поставки на телефонот

- Settings/Connections/Bluetooth
- Поставки/Конекции/Bluetooth

Да се активира bluetooth

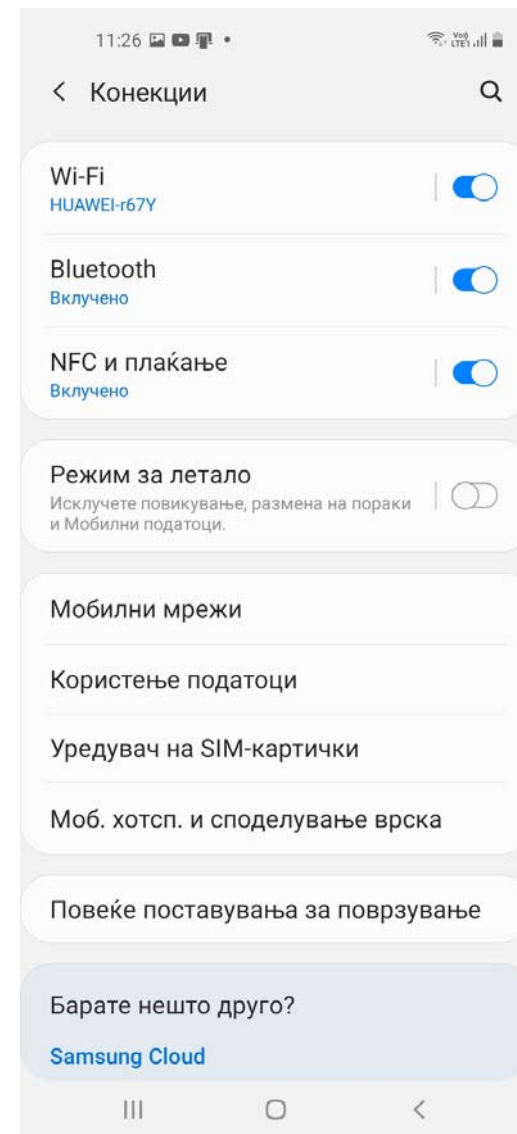

# Симнување Xdrive+ на телефонот





- Скенирај го кју-ар кодот со камерата од телефонот
- Кликнете на прозорчето што ќе ви се појави
- Одберете да ја симнете апликацијата
- Штом ќе се симне апликацијата на телефонот одберете Отвори (Open) од известувањето



Download Xdrive+







# Симнување Хdrip+

- Отвори со инсталатор на пакет
- Инсталирај
- Отвори
- Одбери I Understand and Agree
- Кликни I AGREE
- Кликни I Understand and Agree
- Кликни SAVE

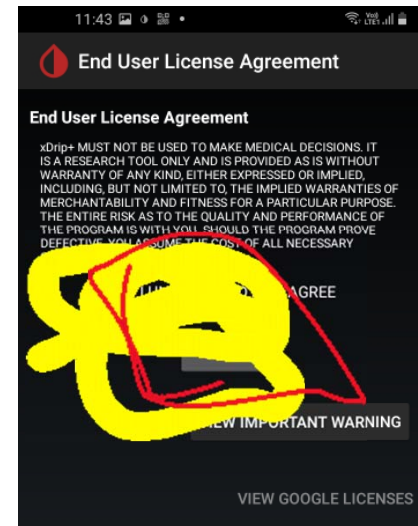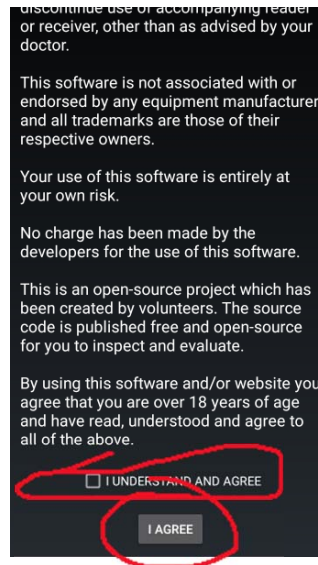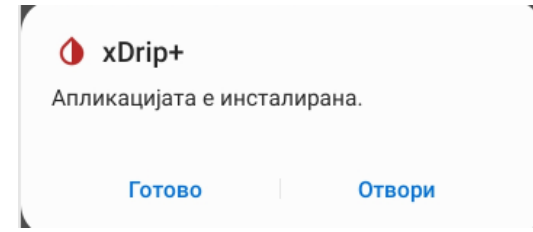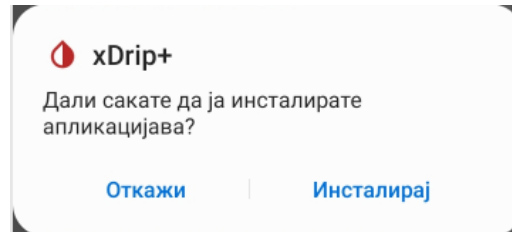


# Врзување Xdrip+/Bubble

- Одбери Libre
- За Либре 1 одбери ја првата опција
- За прашање Are you sure? Одбери YES
- Ако побара PLEASE ALLOW PERMISSION, кликни ОК, потоа кликни ДОЗВОЛИ ЦЕЛО ВРЕМЕ
- Одбери го твојот мост (буббле) од дадената листа за поврзување на блутут.

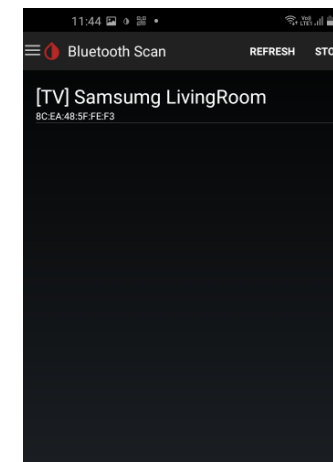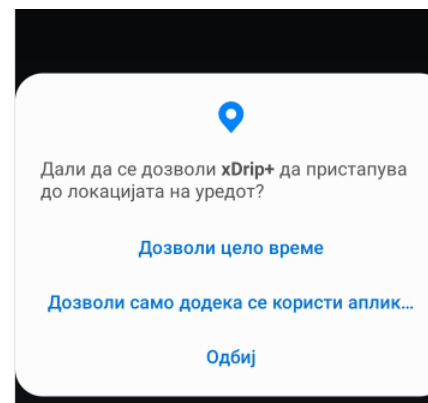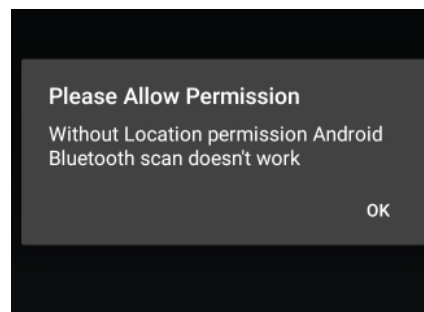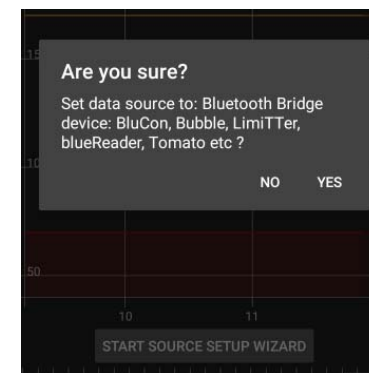
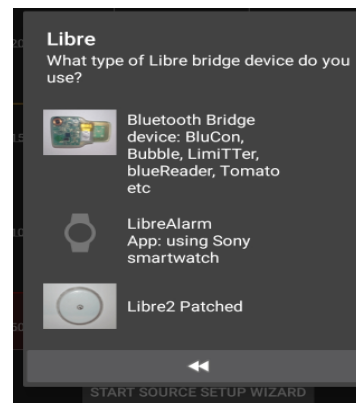
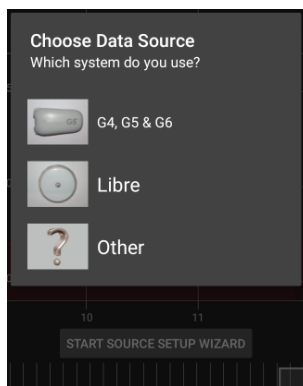


# Поставки на Xdrip+

- Од главното мени (трите линии овде)

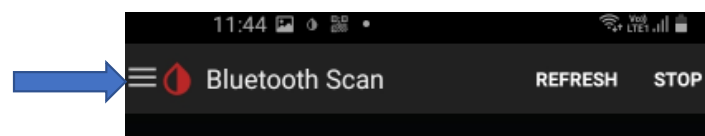


- Одбери Settings
- Одбери Glucose Units
- Одбери повторно Glucose Units и одбери mmol/L

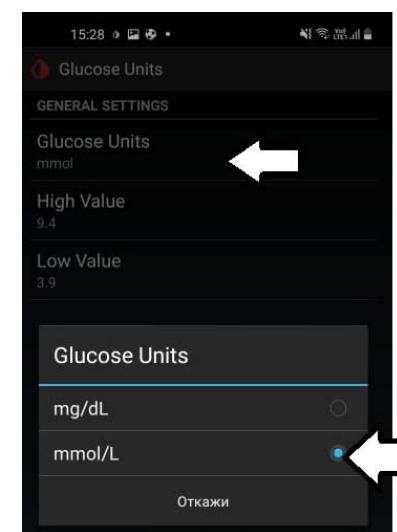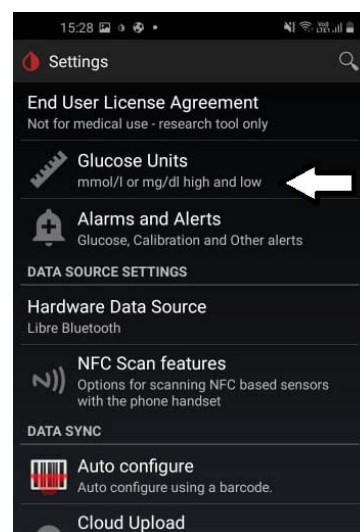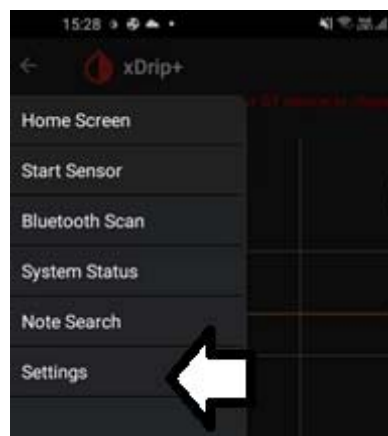



# Поставки на Xdrip+

- Кај High Value и Low Value, одбери ги вредностите на гликемија кои ви се прифатливи, односно ако сметате дека прифатливи вредности на гликемија се од 4.3 до 8.3, запишете ги тие во Low Value I High Value соодветно.

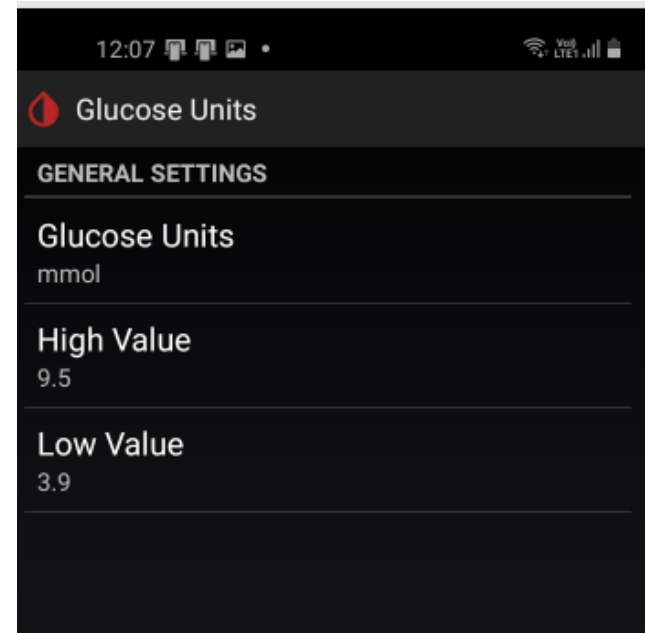

# Поставки на Xdrip+

- Се враќаме на Поставките, и сега одбираме Alarms and Alerts.
- За да се измени алармот за хипогликемија или хипергликемија, треба подолго да се држи притиснат делот каде пишува Low Alert или High Alert, соодветно.

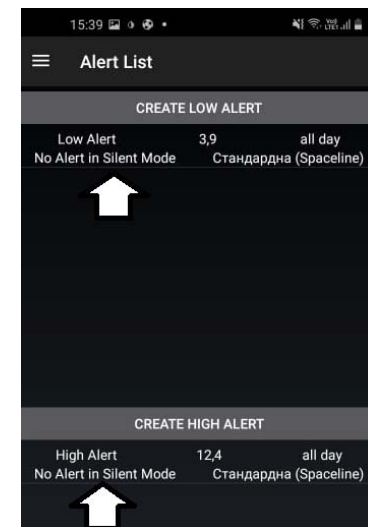
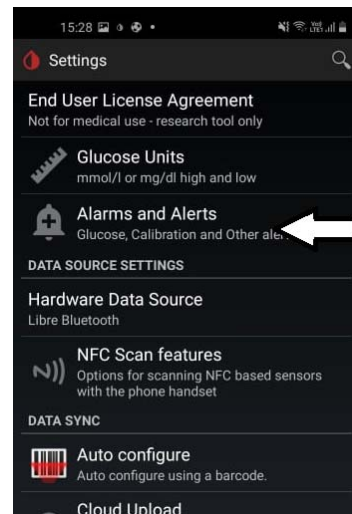


# Поставки на Xdrip+

- За аларм за хипогликемија:






Кај стрелката горе во делот Threshold внеси вредност на гликемија кога сакате да добивате аларм. За да добивате аларм и кога телефонот е во тивок режим на работа одберете кај втората стрелка: Override phone silent mode.

- За аларм за хипергликемија, се следи истиот принцип, со внесување на оние вредности кои ги сакате. Исто, за да добивате постојано известување за хипергликемија, дури и кога телефонот е во тивок режим, одберете Override silent mode.

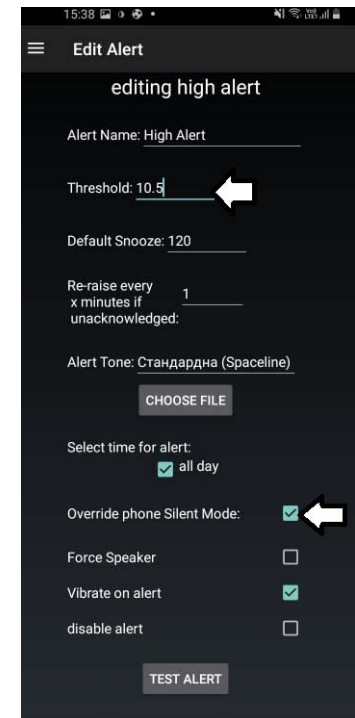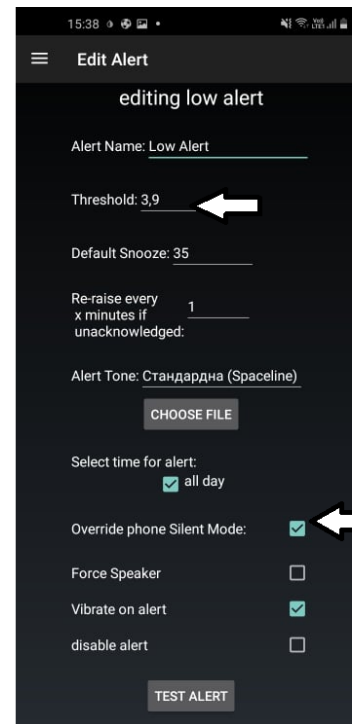


# Стартување на сензорот во xDrip+

- Вратете се на home screen – трите линии горе и кликнете start sensor.
- Ако мостот (буббле) не ви е наместен на сензорот, сега е добро време да го наместите. Кликнете старт сензор потоа.
- Ако сензорот е активиран денес, кликни YES TODAY и внеси го времето кога бил активиран, не мора да е сосема точно.

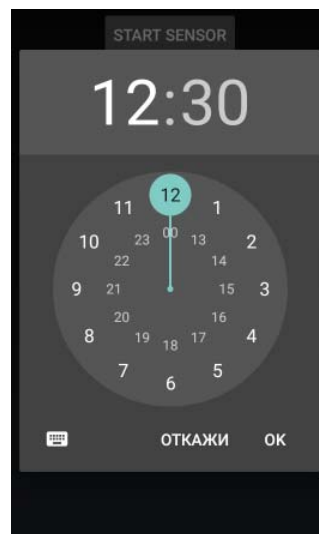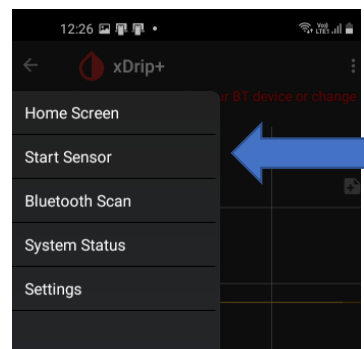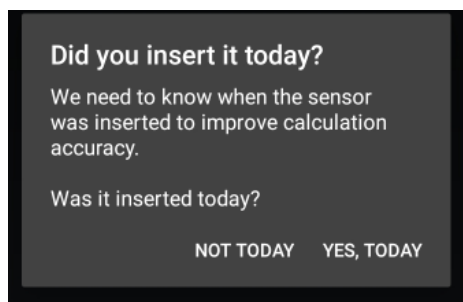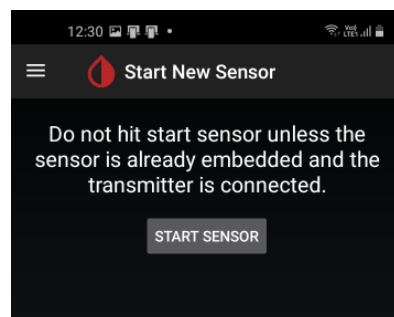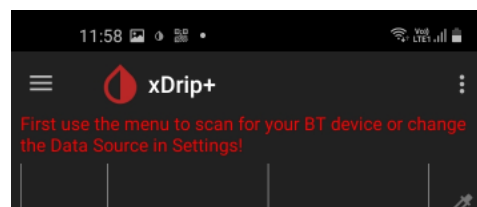


# Поврзување конечна фаза

- Сега започнува поврзувањето помеѓу апликацијата XDRIP+ и мостот. Апликацијата ќе ве информира дека се потребни неколку отчитувања за да почне да прикажува вредности. Обично ова трае десетина-петнаесет минути. Потоа апликацијата ќе ви побара да внесете едно или две мерења од крв. Доволно е да измерите гликемија од прст еднаш и да го внесете резултатот во првото поле. Тука завршува процесот на поставување и на секои 4-6 минути ќе добивате отчитување во апликацијата.

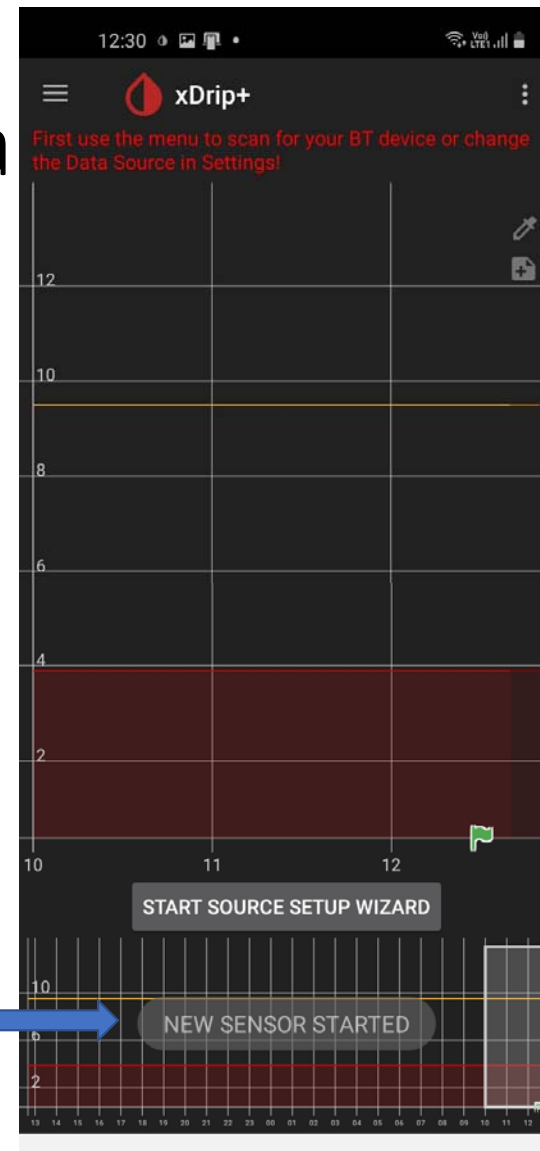

# Постојано известување на екранот

- Можете да имате постојана прегледност на гликемијата без да ја отворате апликацијата. Гликемијата ќе ви се прикажува на екранот секогаш.
- Settings/Less Common Settings/ xDrip+ Display Settings/Number Wall on Lock Screen

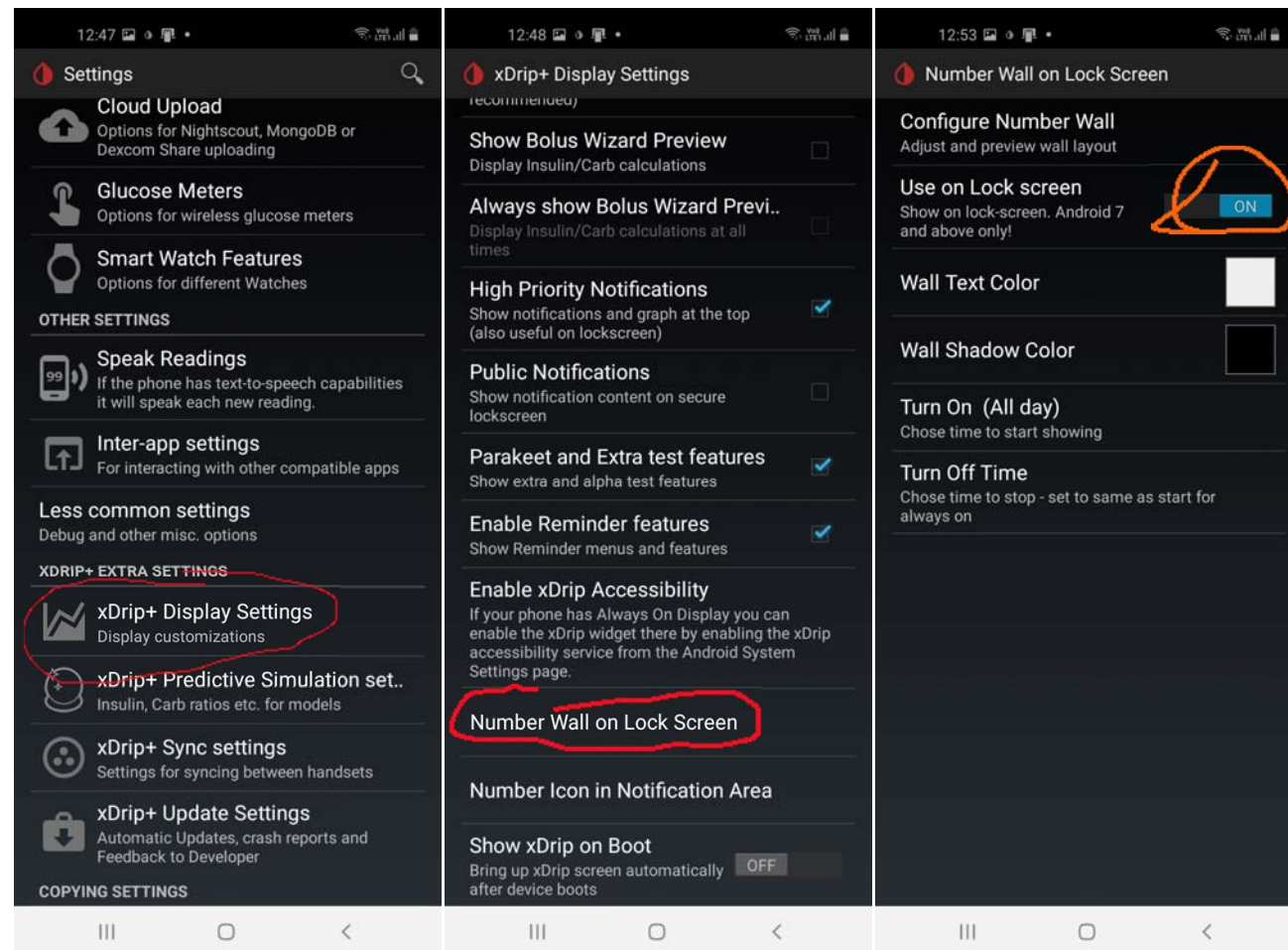

# Групи за поддршка на фејсбук

- bubble
- <https://www.facebook.com/groups/Bubblan.org>
- libre
- <https://www.facebook.com/groups/libregeeks>
- xdrip+
- <https://www.facebook.com/groups/1021594524580709>

Со среќа и со лесно!

