


Поврзување на Libre 2 сензор со Xdrip + без трансмитер

Чекор 1: Инсталирање на LibreLink patched app


(ако веќе ја имате инсталирано апликацијата преку

http://guzelino.eu5.org/APK/librelink_hacked.apk > одете на чекор 2)


- Од Play Store инсталирајте ја апликацијата MEGA на вашиот мобилен телефон и направете сопствен профил (account)

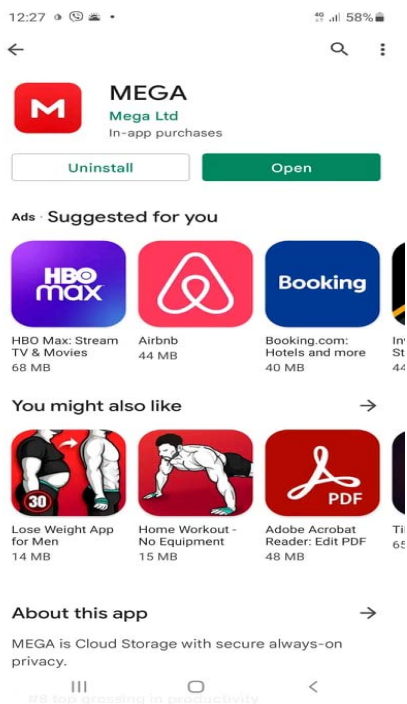


- Отворете го линкот <https://mega.nz/file/iUdFUQAS#h-IUuBAqdtchCptyY5wxOjUkPIKv00v395JCg6w8MWg> и стиснете **OPEN IN MEGA APP**

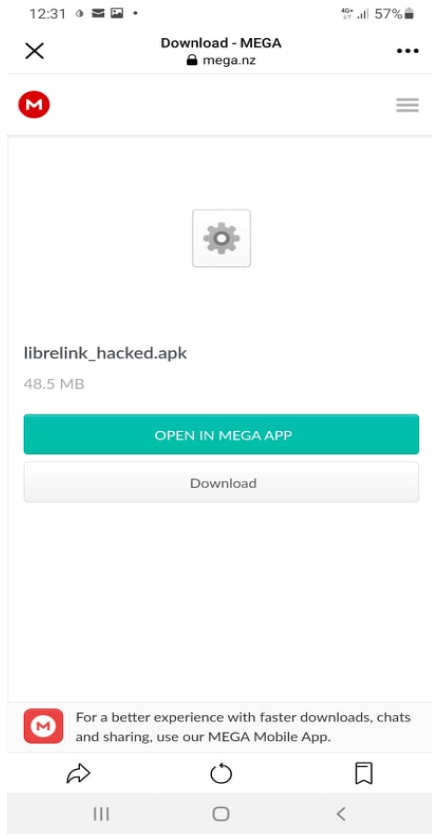


- Стиснете **SAVE TO DEVICE** како на следната слика

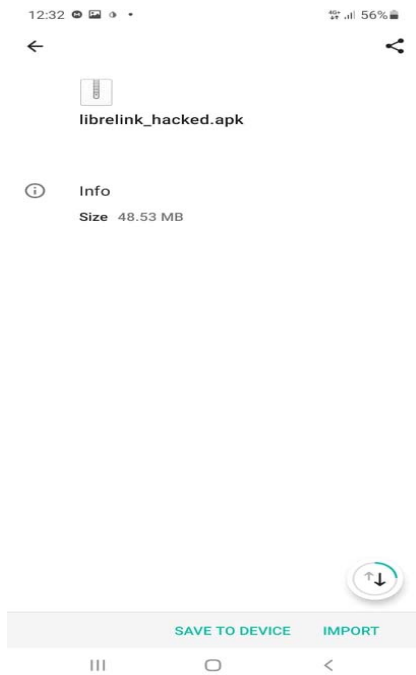

- Потоа одете во My Files → Downloads на вашиот телефон и отворете го фајлот MEGA Downloads

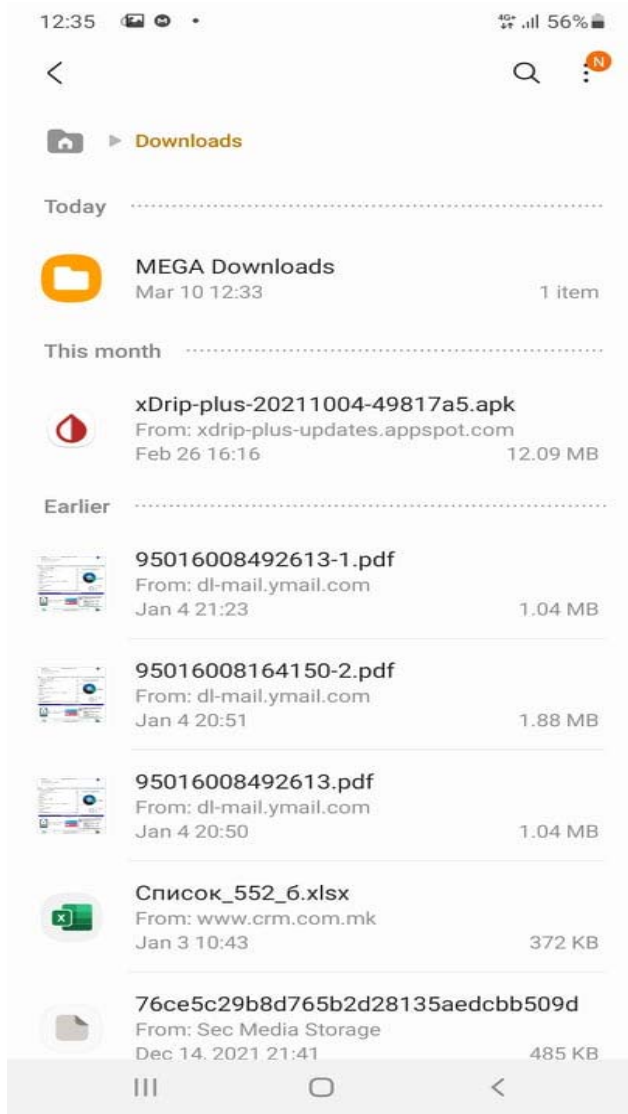

- Одете на librelink_hacked.apk и отворете го со што ќе го завршите инсталирањето на LibreLink апликацијата

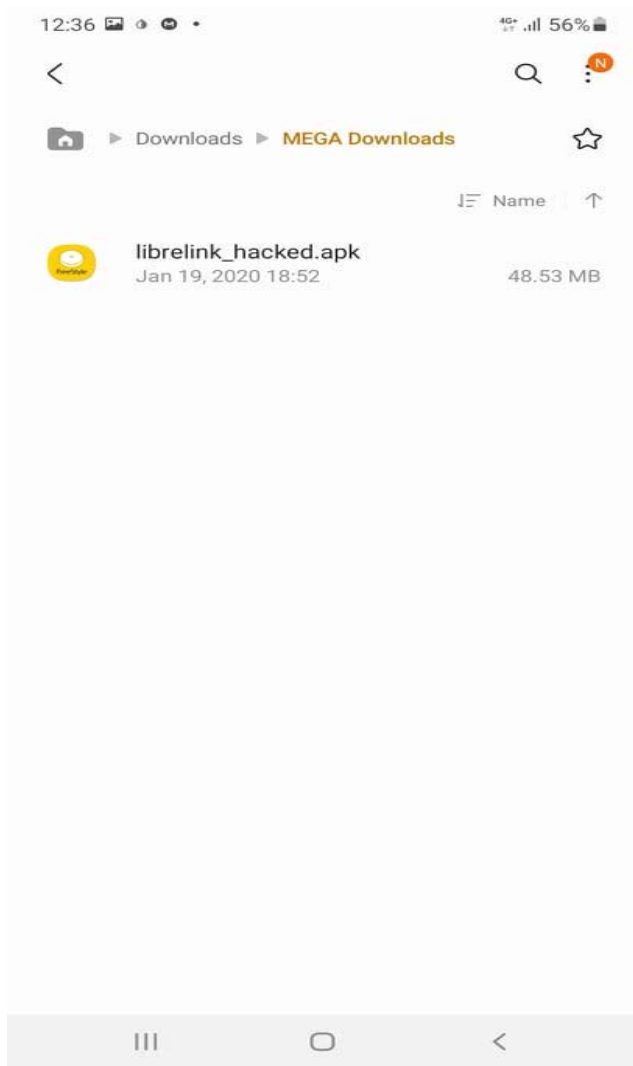

- Откако ќе ги одберете поставките, апликацијата ќе ви побара да поставите нов сензор



Поставки за успешно стартување/активирање на сензорот:

- NFC enabled / BT enabled
- memory and location permission enabled
- location service enabled
- automatic time and time zone setting
- set at least one alarm in the patched app

Забелешка: Доколку го активирате сензорот со читач тогаш ќе може да го користите читачот заедно со алармите на него и ќе може да го читате сензорот исто така и со апликацијата, но на телефонот нема да има аларми.

Доколку го активирате сензорот со апликацијата тогаш со телефонот ќе можете да го читате сензорот и ќе ги имате алармите, но читачот нема да може да го користите.

Сензорот МОРА да се активира со апликацијата доколку сакате да ја поврзете со Xdrip+.




Чекор 2: Инсталирање на Xdrip+ апликацијата (за детални инструкции како да ја инсталирате апликацијата и кои поставки на телефонот се потребни може да видите во еден од документите кои беа презентирани на работилницата и се оставени во групата)





Чекор 3: Врзување на Xdrip+ со LibreLink patched app

- Одберете Libre
- Одберете Libre2 patched
- Settings → Hardware Data Source → Libre2 (patched app)
- Во главното мени одберете “Start Sensor” и “Not today”

На овој начин xdrip+ треба да започне да ги покажува гликемиите на секои 5 минути.

Во прилог ви оставам слики од поставките на Xdrip + од мастерот кои ние го користиме:

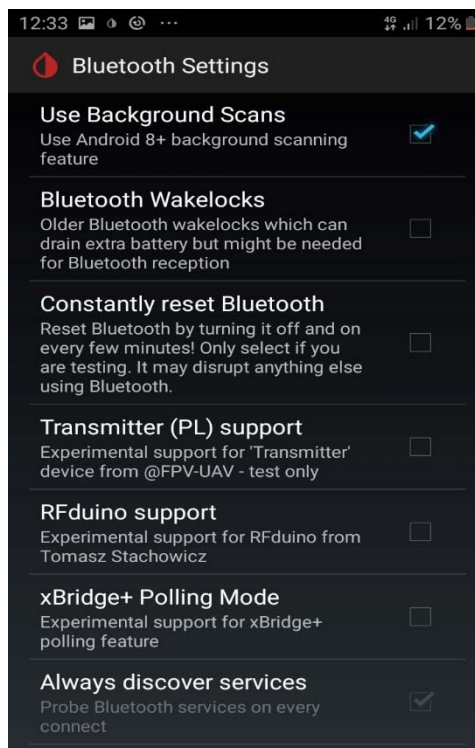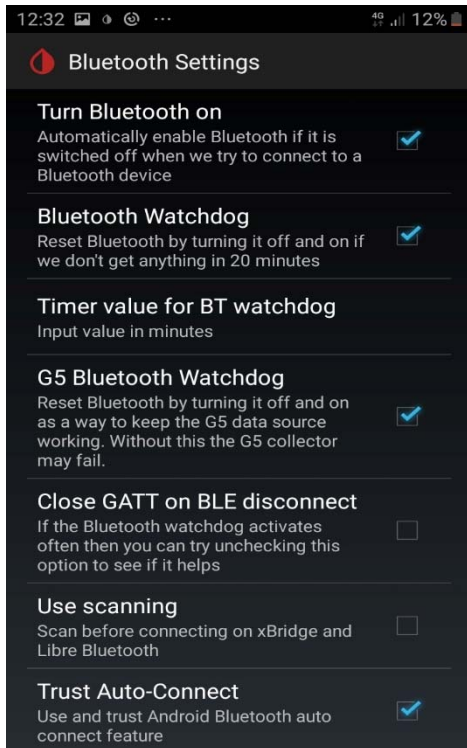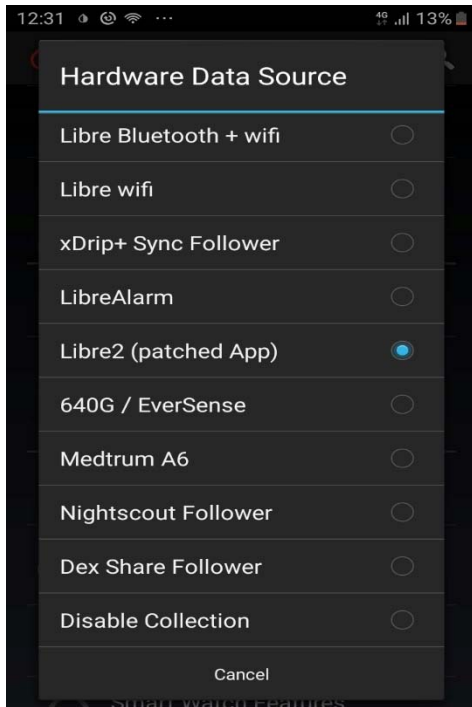

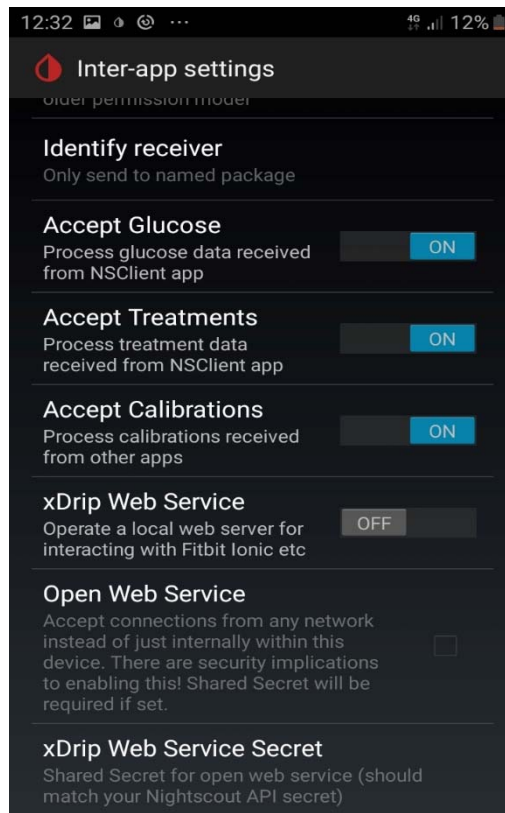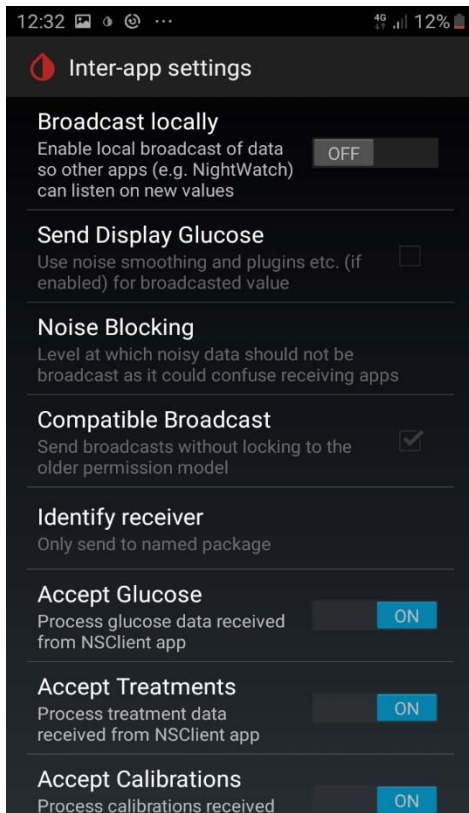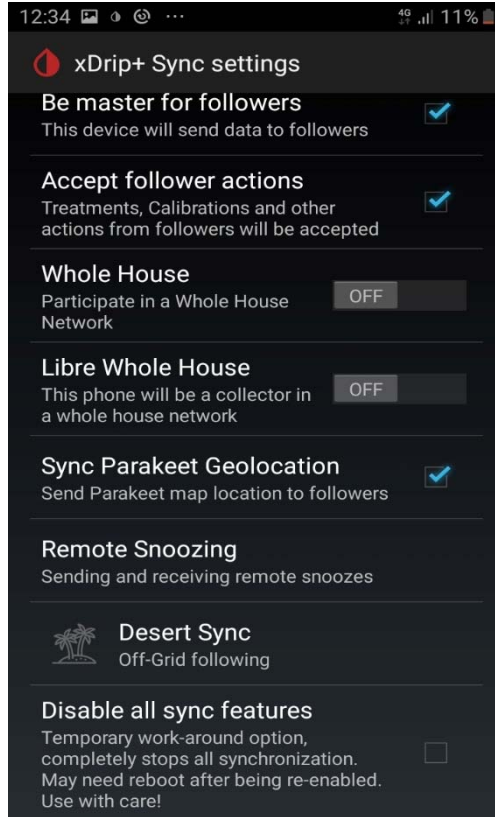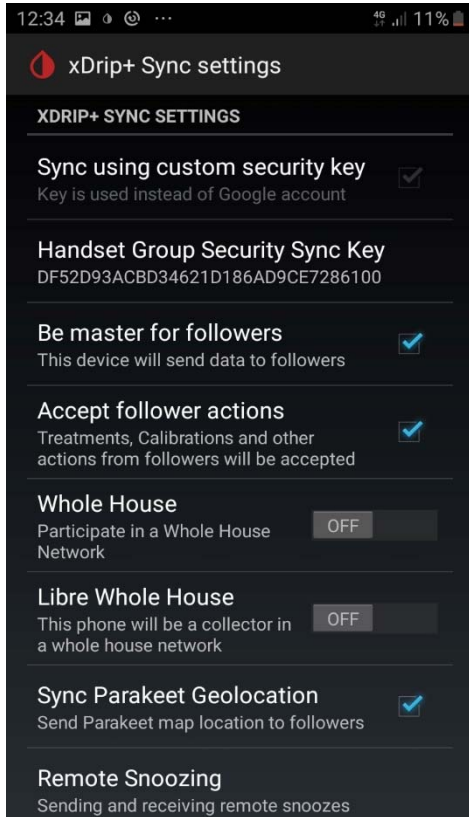

За да може да ја следите гликемијата и на други телефони, треба да ги поставите како followers. За тоа може да ви помогне следново видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=LcgjfbYcWkE>

Доколку сакате да прочитате нешто повеќе за поврзување на LibreLink app и Xdrip+ може да го отворите овој линк:

<https://androidaps.readthedocs.io/en/latest/Hardware/Libre2.html>,

но сепак, од лично искуство задржете се на првичните инструкции.